

カノアクルーがご提案する 装着式人工乳房「ルアナブレスト」

Luana Breast - ルアナブレスト -

- 製品について -

当社の「ルアナブレスト」は、
接着剤なしで簡単にお肌に貼り付けられます。
また、お肌への付け直し、取り外しも非常に簡単です。



*写真是着色前の製品です。納品の際にはお客様の肌の色に合わせて着色を施します。

- Luana Breast の特徴 -

★ 再建手術をしなくとも自然なバストを再現します。

当社の「ルアナブレスト」は100%シリコンを使用した日本製で、取り外しが簡単にでき、お肌にも安全です。熟練の職人がひとつひとつ丁寧に手作りをし、ご自身のお肌の色に合わせて着色をします。キズが隠れるだけではなく、本物と同じような柔らかい感触で自然なバストを再現します。



★ 左右のバランスが整います。

乳房の摘出手術によって、左右の重さのバランスが悪くなり様々なお悩みを抱える方も多いかと思います。「ルアナブレスト」はSサイズ250グラム、Mサイズ約350グラム、Lサイズ450グラムと本物と同じくらいの重さがあり、お肌に貼り付けて左右のバランスを保つことができます。

★ 人目を気にせず温泉に入れます。

専用の接着剤「ルアナフィット」を塗布いただくことで、水に濡れても剥がれ落ちず、自然なバストを維持し、気恥ずかしくなく温泉を楽しんでいただけます。

★ 今までのブラジャーがそのまま使えます。

乳がんパッドを使用される方は、乳がんパッド専用のブラジャーが必要となり改めて専用ブラジャーを購入しなくてはいけませんが、「ルアナブレスト」であれば、今までにお使いになっていたブラジャーをそのまま使用いただくことができます。本物と同じような柔らかさにより、ブラジャーの形状にあわせて変化させることができるのは「ルアナブレスト」の大きな特徴です。

- 価格 -

装着式人工乳房「ルアナブレスト」
S・M サイズ : 297,000円(税込)

L サイズ : 330,000円(税込)

専用接着剤「ルアナフィット」
15ml : 4,400円(税込)

- ルアナブレストの装着・お手入れ方法 -

当社の装着式人工乳房「ルアナブレスト」は、接着剤なしで簡単にお肌に貼り付けられます。また、お肌への付け直し、取り外しも非常に簡単です。



① 横で自分の胸を見ながらバランスの良い位置にそっと貼り付けます。

② ブラジャーをつけます。

③ ブラジャーの下ライン（イラストの赤い部分）が左右同じ高さか確認します。

④ 肩を着てシルエットがきれいに出ているか最終確認します。

- ルアナフィットの使用方法 -

温泉等で利用される場合、また乳房摘出手術によって地肌にくぼみがある等ではがれやすい方は別売りの装着剤「ルアナフィット」をご使用ください。



① 肌からはがれやすい部分の裏面に、容器のハケを使って装着剤を塗布します。
塗る場所は線から両脇2センチ幅の部分だけです。

ハケの代わりに指先を使って伸ばしながら塗っても構いません。

② 装着式人工乳房裏側に塗った装着剤は、5分ほどそのまま放置し、完全に乾燥させてください。乾燥が不十分ですと、付きが悪くなってしまう原因となります。

③ 着かしましたら装着剤を塗った部分を指先で触り、接着力が十分出していることを確認してから地肌に貼りつけます。貼る位置を変えていい場合は、貼り付けてすぐであれば貼り直しができます。

④ 装着式人工乳房をはがす際は、肌からゆっくりと取り外します。製品周囲の薄い部分を傷めることがないよう、お肌と装着式人工乳房の周囲縁周囲（羽根）の間に、市販のクレンジングシートをすべりませながら、地肌からゆっくりとはがしていきます。

⑤ 着物を取り除きます。地肌に残った装着剤の着物は、市販のクレンジングシートで、きれいにふき取ってください。シートで取れない場合、ナイロンタオル等でこすって無理に取ろうとしないでください。時間をおいて翌日に取ると、取りやすくなります。

- お手入れ方法 -



① 使用後は毎回、装着式人工乳房の裏面を洗います。スポンジに洗剤をつけてよく泡立てたら、
スポンジを破り装着式人工乳房の裏面に泡を乗せます。

② 手のひらと指でなでるように優しく洗います。

③ 水洗いで洗剤を落とします。

④ 洗い終わったら、裏面を下向きにしてワックスペーパーの上に乗せ、自然乾燥させます。